

Diinsel Vet®

EN LA **PREVENCIÓN** ESTÁ LA **SOLUCIÓN**
PRUEBAS RÁPIDAS PARA **DIAGNÓSTICO VETERINARIO**

Prueba rápida de anticuerpos Brucella



El Dispositivo de Prueba de Anticuerpos Brucella está destinado para la detección cualitativa de anticuerpos Brucella (Bru) en muestras de sangre entera y suero de mascotas.


ESPECIFICACIONES

- **Contenido:** 20 Pruebas, 20 pipetas y 2 buffer.
- **Muestra:** Sangre o suero de mascotas.
- **Tiempo de prueba:** 5-10 minutos.
- **Duración:** 24 meses.
- **Almacenamiento:** 2-25° C

MODO DE USO

- 1 Recopile muestra de sangre entera y suero.
- 2 Lleve la bolsa a temperatura ambiente antes de abrirla. Retire el dispositivo de prueba de la bolsa sellada y colóquelo sobre una superficie limpia y nivelada.
- 3 Retire prueba de su embalaje.
- 4 Sostenga el gotero verticalmente y transfiera 2 gotas de muestra al pocillo de muestra(s) del dispositivo de prueba.
- 5 Agregue 1 gota de tampón y ponga en marcha el cronómetro.
- 6 Lea los resultados después de 5-10 minutos. *No interpretar después de 15 minutos.*

2 gotas de sangre
+ 1 gota de buffer

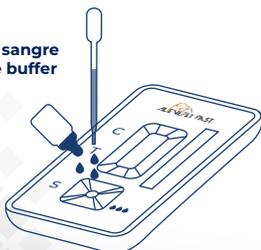

2 gotas de suero
+ 1 gota de buffer



CONTROL DE CALIDAD

- Almacene la muestra a 2-8 °C para su uso dentro de las 24 horas o a -25 °C
- Se garantiza la estabilidad hasta la fecha de caducidad marcada en contenedores y embalajes exteriores.
- Mantenga la muestra a 22-25°C (temperatura ambiente) durante 15-30 min
- **NO CONGELAR.** No someter a una exposición solar directa cuando no esté en uso.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS



Positivo



Negativo



Inválido

LIMITACIONES

La prueba es para uso profesional de diagnóstico in vitro, y solo debe usarse para la detección cualitativa de anticuerpos de Brucella. Si hay un resultado positivo, confírmelo con un método de confirmación. Para otros diagnósticos clínicos adicionales, consulte al veterinario.

Teléfono: 81 3606 3689

Diinsel Vet | Venezuela 342, Col. Vista Hermosa | Monterrey | 64620

