

# Diinsel Vet®

EN LA **PREVENCIÓN** ESTÁ LA **SOLUCIÓN**  
PRUEBAS RÁPIDAS PARA **DIAGNÓSTICO VETERINARIO**

## Prueba rápida de antígeno H. Pylori

**Canino y felino**



El Dispositivo de Prueba de Antígeno de H. pylori Felino y Canino está destinado a la detección cualitativa de antígenos (Ag) de Helicobacter pylori (HP) Felino o Canino de las secreciones fecales.


### ESPECIFICACIONES

- **Contenido:** 20 Pruebas, 20 buffer y 20 hisopos.
- **Muestra:** Secreciones fecales caninas o felinas.
- **Tiempo de prueba:** 5-10 minutos.
- **Duración:** 24 meses.
- **Almacenamiento:** 2-30° C

### MODO DE USO

- 1 Recoja las secreciones fecales dos veces con el hisopo proporcionado.
- 2 Desprenda la tapa del tampón diluido y coloque el hisopo en el tubo del tampón.
- 3 Gire de 6 a 8 veces el hisopo a lo largo de los lados de la botella del tampón.
- 4 Deje reposar durante 2 minutos y coloque la tapa.
- 5 Coloque 3 gotas de la muestra en el pozo del dispositivo.
- 6 Lea los resultados a los 10 minutos. *No interpretar después de 15 minutos.*

\*La muestra debe realizarse dentro de la hora posterior a la recolección.

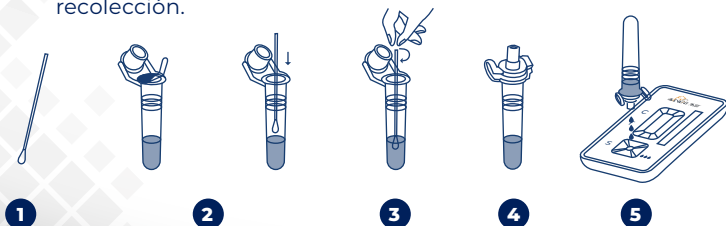

### CONTROL DE CALIDAD

- Almacenar a una temperatura de 2 ~ 30 °C en un lugar fresco y seco.
- Se garantiza la estabilidad hasta la fecha de caducidad marcada en contenedores y embalajes exteriores.
- Todos los componentes deben estar a temperatura ambiente (15-30 °C) antes de realizar la prueba.
- **NO CONGELAR.** No someter a una exposición solar directa cuando no esté en uso.

### INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS



### LIMITACIONES

La prueba es para uso profesional de diagnóstico in vitro, y solo debe usarse para la detección cualitativa de antígenos virales específicos de Helicobacter pylori felino y canino. Si hay un resultado positivo, confírmelo con un método confirmatorio. Para otros diagnósticos clínicos adicionales, consulte al veterinario.

📞 Teléfono: 81 3606 3689

Diinsel Vet | Venezuela 342, Col. Vista Hermosa | Monterrey | 64620

