

Diinsel Vet®

EN LA **PREVENCIÓN** ESTÁ LA **SOLUCIÓN**
PRUEBAS RÁPIDAS PARA **DIAGNÓSTICO VETERINARIO**

Prueba rápida de antígeno Rotavirus

Canino y felino



El Dispositivo de Prueba de Antígeno de Rotavirus Felino y Canino está destinado para la detección cualitativa de antígenos de rotavirus felino o canino (Ag) de las secreciones fecales de la mascota.


ESPECIFICACIONES

- **Contenido:** 20 Pruebas, 20 buffer y 20 hisopos.
- **Muestra:** Secreciones fecales caninas o felinas.
- **Tiempo de prueba:** 5-10 minutos.
- **Duración:** 24 meses.
- **Almacenamiento:** 2-30° C

MODO DE USO

- 1 Recoja las secreciones fecales dos veces con el hisopo proporcionado.
- 2 Desprenda la tapa del tampón diluido y coloque el hisopo en el tubo del tampón.
- 3 Gire de 6 a 8 veces el hisopo a lo largo de los lados de la botella del tampón.
- 4 Deje reposar durante 2 minutos y coloque la tapa.
- 5 Coloque 3 gotas de la muestra en el pozo del dispositivo.
- 6 Lea los resultados a los 10 minutos. *No interpretar después de 15 minutos.*

*La muestra debe realizarse dentro de la hora posterior a la recolección.

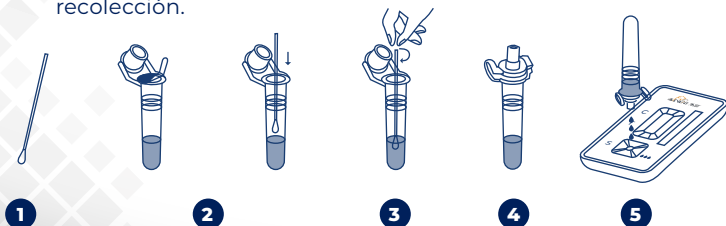

CONTROL DE CALIDAD

- Almacenar a una temperatura de 2 ~ 30 °C en un lugar fresco y seco.
- Se garantiza la estabilidad hasta la fecha de caducidad marcada en contenedores y embalajes exteriores.
- Todos los componentes deben estar a temperatura ambiente (15-30 °C) antes de realizar la prueba.
- **NO CONGELAR.** No someter a una exposición solar directa cuando no esté en uso.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS



Positivo

Negativo

Inválido

LIMITACIONES

La prueba es para uso profesional diagnóstico in vitro y solo debe usarse para la detección cualitativa de antígenos de rotavirus caninos o felinos. Si hay un resultado positivo, por favor confírmelo con un método de confirmación. Para otros diagnósticos clínicos adicionales, consulte al veterinario.

Teléfono: 81 3606 3689

Diinsel Vet | Venezuela 342, Col. Vista Hermosa | Monterrey | 64620

